



# Cicatridina®

## ЦИКАТРИДИНА

Вагинальные суппозитории с гиалуроновой кислотой и экстрактами 4-х лекарственных трав

Медицинский прибор СС 0373  
Свидетельство государственной регистрации №12890/2013

ПРИРОДНЫХ  
КОМПОНЕНТОВ  
ДЛЯ ЗАГОЕНИЯ,  
ЗВОЛОЖЕНИЯ  
ТКАНИН ПИХВИ  
І ШИЙКИ МАТКИ



[www.cicatridina.com.ua](http://www.cicatridina.com.ua)



ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГАРАНТОВАНА  
TUV SUD - сертифікат № Q1N 14 02 75765 002 (Германія)  
відповідності вимогам на продукцію Європейській Директиві  
EN ISO 13485:2012+AC:2012

# ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ І ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПИХВИ ТА ШИЙКИ МАТКИ



СПРИЯЄ ПРИРОДНОМУ  
ЗАГОЕННЮ РАН



УСУВАЄ  
ЗАПАЛЬНИЙ ПРОЦЕС



СТВОРИЄ ЗАХИСТНУ ПЛІВКУ  
НА СЛИЗОВІЙ ПИХВИ  
ТА ШИЙКИ МАТКИ



НОРМАЛІЗУЄ ПРИРОДНЕ  
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА  
ЗМАШУВАННЯ ПИХВИ

# РЕКОМЕНДАЦІ ДЛЯ ЖІНОК ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА ШИЙЦІ МАТКИ

Медведев Михайло Володимирович  
акушер-гінеколог вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Після хірургічного лікування захворювань шийки матки у Вас з'являться вагінальні виділення, іноді з дещо неприємним запахом, домішками крові, які можуть тривати від 2 до 4 тижнів. Також 2-3 дні Вас може турбувати тягнучий біль внизу живота.

## РЕКОМЕНДОВАНО:



З першого ж дня після процедури необхідно використовувати Цикатридина по 1 вагінальному супозиторію на ніч протягом 10-20 днів.



Для усунення болю можна приймати таблетки Ібупрофен 200 мг по 1-2 таблетки не більше 3 разів на добу.



Утримання від статевих стосунків протягом 1 місяця.



Обмежити фізичне навантаження протягом 1-2 тижнів.



Купання тільки під душем протягом місяця.



Спринцювання заборонено.



Не використовувати тампони.  
Користуйтеся прокладками.



ПРИ ПІДВИЩЕННІ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА БІЛЬШЕ 38°C,  
ПРИ ПОСИЛЕННІ БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТІВ АБО ВИНИКНЕННІ  
РЯСУОЇ АБО ТРИВАЛОЇ КРОВОТЕЧІ  
СЛІД НЕГАЙНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ.